

EasyTurn vende- og glidelagener samt pudebetræk

Con/Sept incontinenensprodukter

Sikkerhed - Kvalitet - Hygiejne - Komfort

EasyTurn og Con/Sept kan ligge permanent i sengen. De består af åndbare materialer og tillader fugt at trænge uhindret igennem og blive borttransporteret

Unikke hjælpemidler, der kan anvendes hver for sig eller kombineres. De kan helt tilpasses den individuelle pleje, hvad enten patienten skal have hjælp til selv at vende sig eller skal forflyttes. Ideelle kombinationer også for den incontinente bruger.

Alle EasyTurn lagener har en friktionsnedsat midtersektion, som *udelukkende* er glat i tværgående retning, så brugeren ikke glider ned i sengen ved gærdeløft. Desuden har de en 10-15 cm glidfri sikkerhedszone ved kanterne af sengen og en skridsikker bomuldsunderside som sikrer at de ligger stabilt fast mod underlaget.

Formålet med alle *EasyTurn* produkterne er, qua deres friktionssvage glideflade, at reducere træk- ket i huden under flytning og vending, hvorved de skadelige tværtrækkkræfter nedsættes. Samtidig animeres brugeren til at flytte sig hyppigere; herved flyttes trykpunkterne oftere og risikoen for tryksår reduceres. Virkningen af trykaflastningsmadrasser optimeres, idet den immobiliserende effekt, som nedsækning i bløde madrasser altid medfører, reduceres.

EasyTurn Faconsyet Lagen - med indlagt glideflade og "vinger"

Fordele:

- Passer til madrasser i enkeltsenge og er meget nemt at lægge på
- Glidefladen vil automatisk ligge korrekt i sengen
- Minimerer antal linnedstykker i sengen (vigtigt ved vekseltrykaflastning)
- "Vingerne" sikrer, at lagenet ikke kryber ud ved højdeændring af gærderne.
- Om ønsket kan man "blænde" dele af glidefladen af med almindeligt stiklagen
- Overgangen mellem glidedel og sikkerhedszone er uden fremspringende sømme som kan genere sensitiv eller tryksårsudsat hud



Faconsyet 200 cm x 85 cm hvid/hvid

EasyTurn Standard Lagen (260 x 160 cm) med indlagt glideflade

Fordele:

- Kan anvendes i senge med forskellige madrasmål
- Let at tilpasse glidefladens position til specielle behov
- Let at "blænde" dele af glidefladen af med almindeligt stiklagen
- Overgang mellem glidedel og sikkerhedszone uden fremspringende sømme



EasyTurn Stiklagener med glidesektion og sikkerhedskanter 110 x 200 og 150 x 200 cm.

Fordele:

- Det korte lagen (110 cm) anvendes som hjælp til selv at vende sig
- Det lange lagen (150 cm) anvendes ved forflytning
- Øvrige fordele er de samme som nævnt under EasyTurn Faconsyet Lagen
- Det korte lagen (110 cm) kan med glidesiden nedad anvendes til at flytte patienter opad i sengen.



EasyTurn 110 x 200 cm blå / hvid

Eksempler på indikationsområder for EasyTurn:

Tryksår, muskelsvækkelse, f.eks.: sclerose, alder.
Smerte ved bevægelse, f.eks.: arthritis, osteoporose,
muskel- og knogleskader samt generel nedsat mobilitet.



EasyTurn 150 x 200 cm hvid / hvid

EasyTurn Hovedpudebetræk med glidesektion på den ene side.

Fordele:

- Gør det let at flytte hovedet hyppigt og herved ændre trykpunkter. Risiko for tryksår på ørerne reduceres. Sårsmarter reduceres
- Den åndbare overflade mindsker fugtdannelse
- Kan i en snæver vending anvendes med glidesiden nedad til at hjælpe opad i sengen

EasyTurn kan efter aftale fremstilles i specialstørrelser.

Brugsanvisning for EasyTurn

For at opnå den bedst mulige effekt skal EasyTurn placeres højt oppe i sengen, d.v.s. 5-10 cm ind under puden, således at kroppen fra skulderen til den øverste del af lårene hviler på glidestykket. Sidesykkerne stoppes ind under madrassen og placeres således at der er en bred "bremsekant"/sikkerhedszone, som samtidig giver støtte til patienten, når denne står ud af sengen. (Ved tryksårsunderlag som kræver løstsiddende sengelinned, anbringes EasyTurn tilstrækkeligt løst, men glat).

1. EasyTurn som hjælpemiddel for den sengeliggende til at vende sig selv.

Anvend 110 x 200.

Brugeren ligger direkte på EasyTurn. Den nedsatte friktion gør det lettere for brugeren selv at ændre liggestilling ved at "sakse" med fødderne og skubbe glide til den ønskede liggestilling.

2. EasyTurn som hjælpemiddel for plejepersonale i samarbejde med patienten.

Brugeren ligger direkte på EasyTurn. Plejepersonalet hjælper med rolige greb patienten med at vende sig på glidefladen.

3. EasyTurn som hjælpemiddel for plejepersonale. Forflytning med trækragen.

Alle typer EasyTurn kan anvendes.

Trækragen ligger ovenpå EasyTurn. Hjælperne forflytter patienten ved roligt og blidt at trække vendelagenet til sig (ikke løfte) og derpå vende patienten ved at gå ned i knæ. Den nedsatte friktion mellem vendelagen og EasyTurn gør trække- og vendebevægelsen lettere for hjælperne og vendingen blidere for patientens hud.

NB: Ved forflytning kan man med fordel anvende de 150 cm lange glideflader med glidefladen op under hele hovedpuden, som derved bliver lettere at flytte sammen med patienten.

Alle typer EasyTurn kan ligge permanent i sengen idet materialet er åndbart.

Materialer

Midterparti (glideflade): Specialvævet 100% polyester.

Sideparti og underflade: Forbehandlet 35% polyester, 65% bomuld.

CE-mærket.

Vask

EasyTurn kan vaskes ved temperaturer op til 90°C og kan tørretumbles. Rulning eller strygning efter vask, ved max. 150°, forbedrer glideevnen. Undgå skarpe genstande (f.eks lynlåse) mod glidefladen.

Produkt	Størrelse <i>længde x bredde</i>	Farve	Glideflade <i>bredde</i>	Varenummer
EasyTurn stiklagen	110 x 200	hvid/hvid	60 cm	4500-0010
EasyTurn stiklagen	110 x 200	blå/hvid	60 cm	4500-0011
EasyTurn stiklagen	110 x 200	hvid/hvid	70 cm	4500-0020
EasyTurn stiklagen	110 x 200	blå/hvid	70 cm	4500-0021
EasyTurn stiklagen	150 x 200	hvid/hvid	60 cm	4500-0030
EasyTurn stiklagen	150 x 200	blå/hvid	60 cm	4500-0031
EasyTurn stiklagen (osteopo)	110 x 220	hvid/hvid	75 cm	4500-0070
EasyTurn stiklagen (osteopo)	95 x 225	blå/hvid	75 cm	4500-0071
			<i>bredde x længde</i>	
EasyTurn Queen	145 x 285	hvid/hvid	130 cm x 145 cm	4500-0080
EasyTurn Queen facon	200 x 150	hvid/hvid	135 cm x 147 cm	4500-0081
			<i>bredde x længde</i>	
EasyTurn standardlagen	260 x 210	hvid/hvid	60 cm x 260 cm	4500-0050
EasyTurn faconsyet lagen	200 x 85	hvid/hvid	60 cm x 150 cm	4500-0040
EasyTurn faconsyet lagen	200 x 85	hvid/blå	60 cm x 110 cm	4500-0041
EasyTurn hovedpudebetræk	74 x 50	hvid/hvid	74 cm x 50 cm	4500-0060
EasyTurn hovedpudebetræk	64 x 50	hvid/hvid	64 cm x 50 cm	4500-0061

Vend ➡

Con/Sept incontinensbeskyttelse



Con/Sept overflade samt vendevinger

*Con/Sept incontinens stiklagen
med glideunderside.
"Vend let – hold tæt"*



Samtlige incontinensprodukter er fremstillet af en ny generation af vaskbare fibre, polyester, rayon og polyurethanfolie. Fugtspærren er lamineret. De forskellige lag er fint sammensvejst til én enhed, hvilket forhindrer at produktet krøller/folder under brugeren, og det er en *speciel sikkerhed for den tryksårstruede patient*.

Con/Sept har en meget høj absorptionsevne (Standard 75x90 cm kan absorbere ca. 2 liter), og samtidig er væskespredningen meget begrænset. Ingen af Con/Sept produkterne indeholder PVC.

Con/Sept med vendevinger er udformet på 2 forskellige måder:

1. *Uden glideunderside*, velegnet til placering ovenpå madras med eller uden EasyTurn (se illustrationerne). Velegnet til meget skånsom vending hvor man i forvejen anvender EasyTurn.
2. *Med glideunderside*, specielt velegnet til den incontinente patient der skal vendes og hvor man kun ønsker et stiklagen i sengen.

Vask af Con/Sept

- 60°C kort vaskeprogram. Undgå antistatiske og blødgørende vaskemidler.
- Til desinfektion 85°C i 7 minutter, derefter kort vaskeprogram.
- Det kan holde til at blive vasket 300-400 gange.
- Undgå at vaske Con/Sept sammen med hårde materialer, f.eks. lynlåse.

<u>Produkt</u>	<u>Størrelse</u> <i>længde x bredde</i>		<u>Varenummer</u>
Con/Sept stiklagen	75 x 90	Med glideunderside og 50 cm vinger	4300-0075
Con/Sept stiklagen	100 x 90	Med glideunderside og 50 cm vinger	4300-0078
Con/Sept stiklagen	75 x 90	Med 50 cm vinger	4300-0085
Con/Sept stiklagen	100 x 90	Med 50 cm vinger	4300-0087
Con/Sept stiklagen	200 x 90	Med 50 cm vinger	4300-0088

Wel-Med / Scanbio

Wel-Med / Scanbio ApS, Industrivej 19 D, 4000 Roskilde, Danmark, Tlf. +45 46 37 45 99, Fax +45 46 37 46 79
E-mail: scanbio@inet.uni2.dk, Homepage: www.scanbio.dk